



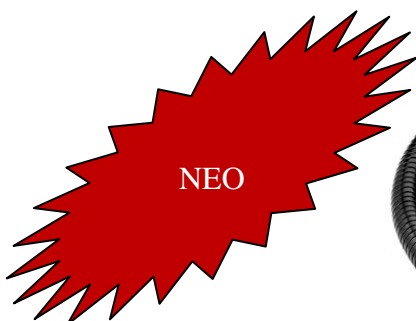

Χ. ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ – Α. ΠΡΟΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 182
ΤΗΛ. 210 6436510 – FAX 210 6436508
Email : info@globaldental.gr

Smile Lite MDP

Σύστημα οδοντιατρικής φωτογράφισης από τον καθηγητή Louis Hardan

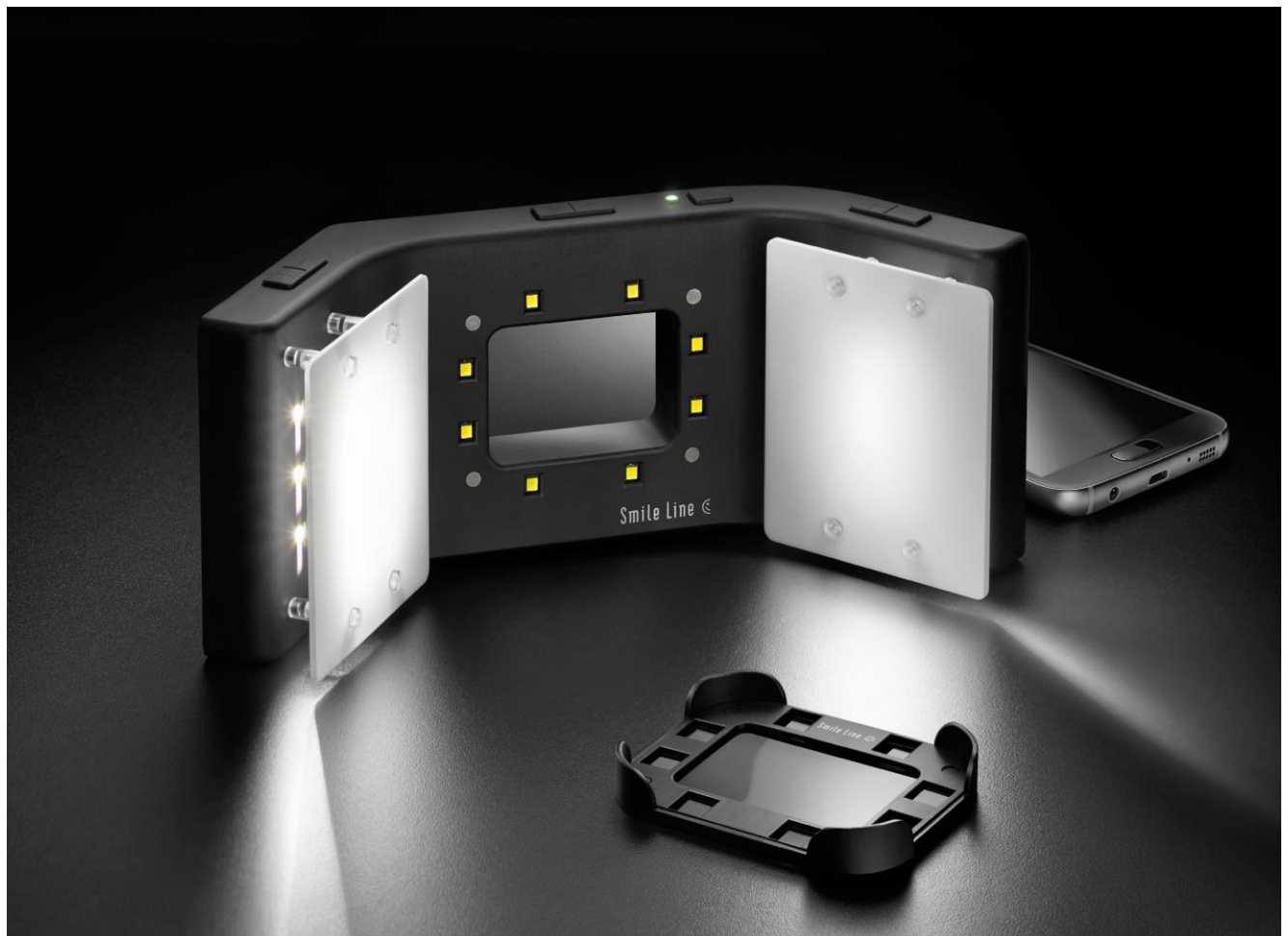

Η επαγγελματική οδοντιατρική φωτογραφία είναι πλέον προσβάσιμη σε όλους

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Φωτογραφίες, χωρίς ρετούς, τραβηγμένες με smartphone + Smile Lite MDP



Κεντρικά Led φωτισμού

Η λήψη της φωτογραφίας στα αριστερά έγινε με τη χρήση κεντρικών Led φωτισμού, με μέγιστη ισχύ (με σβησμένα τα πλευρικά Led). Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο μ' αυτό που θα είχε επιτευχθεί με τη χρήση περιμετρικού φλας. Χρησιμοποιήθηκε φωτογραφικό contrast ως μαύρο φόντο κατά μήκος ως παρειοκάτοχο.



Πλευρικά Led φωτισμού

Εδώ χρησιμοποιήθηκαν πλευρικά Led φωτισμού (αριστερά και δεξιά) με μέγιστη ισχύ (με σβησμένα τα κεντρικά Led). Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο μ' αυτό που θα είχε επιτευχθεί με τη χρήση διπλού φλας. Χρησιμοποιήθηκε φωτογραφικό contrast ως μαύρο φόντο κατά μήκος ως παρειοκάτοχο.



Εικόνα με διαθλατήρες

Η λήψη της φωτογραφίας έγινε με κεντρικά Led, με μέγιστη ισχύ, με τους διαθλατήρες αναμμένους (με σβησμένα τα κεντρικά Led). Χρησιμοποιήθηκε φωτογραφικό contrast ως μαύρο φόντο κατά μήκος ως παρειοκάτοχο. Το φως των διαθλατήρων δημιουργεί ένα εφέ σκίασης που επιτρέπει να δείτε τη δομή της επιφάνειας των δοντιών και των ούλων.



Εικόνα με φίλτρο πόλωσης

Η λήψη της φωτογραφίας στα δεξιά έγινε με κεντρικά Led σε μέγιστη ισχύ και με το φίλτρο πόλωσης (με σβησμένα τα πλευρικά Led). Χρησιμοποιήθηκε φωτογραφικό contrast ως μαύρο φόντο κατά μήκος ως παρειοκάτοχο.





Εικόνα με φίλτρα πόλωσης και διαθλατήρες

Η λήψη της φωτογραφίας έγινε με μίξη τεχνικής, συνδυάζοντας το φίλτρο πόλωσης και τους διαθλατήρες (όλα τα Led είναι αναμμένα - μην διστάζετε να πειραματιστείτε με την ισχύ του πλευρικού φωτός). Αυτή η εικόνα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί με SLR κάμερα. Χρησιμοποιήθηκε φωτογραφικό contrast ως μαύρο φόντο κατά μήκος ως παρειοκάτοχο.



Εσωτερική εικόνα

Η λήψη της φωτογραφίας αριστερά, έγινε με όλα τα Led σε μέγιστη ισχύ προκειμένου να έχουμε επαρκή φωτισμό στο εσωτερικό του δοντιού. Η χρήση των παρειοκάτοχων είναι απαραίτητη. Ανάλογα με την περίπτωση, θα επιλέξουμε να δουλέψουμε με φωτογραφικό contrast, ένα παρειοκάτοχο Photo CAD ή με καθρέφτη σύγκλισης.



Χ. ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ – Α. ΠΡΟΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ. 210 6436510 Email : info@globaldental.gr